


# Apesin SPRAY

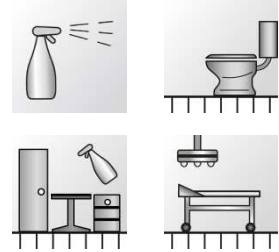

## Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο έναντι των ιών H1N1, HBV και HIV

### Σύνθεση:

100gr APESIN Spray περιέχουν: 70g προπταν-2-όλη, 0,1g N-(3-αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπано-1,3-διαμίνη. Άλλα συστατικά: αρωματικές ουσίες. pH: περίπου 10,4.

### Ιδιότητες:

Απολυμαντικό επιφανειών. Το APESIN SPRAY έχει βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο δραστηριότητα έναντι των ιών HBV (Ηπατίτιδα-B) και AIDS (HIV). Δραστικό έναντι όλων των ζωικών ιών γρίπης (H1N1 και H3N8). Είναι άχρωμο, με ευχάριστη οσμή, απαλό με το δέρμα. Είναι κατάλληλο για την απολύμανση χειρουργικών υποδημάτων. Δεν περιέχει χλώριο, αλδεΐδες και φαινόλες.

	30sec	1min	2min	5min	15min
DGHM-VAH, geringe org. Belastung mit Mechanik				conc.	
DGHM-VAH, hohe org. Belastung mit Mechanik conc.				conc.	
Hep. B/HIV					conc.
Hep. C (BVDV)	conc.				
Vakzinaviren	conc.				
Influenza A viren H3N8	conc.				
Schnelldesinfektion		conc.			
TBC DGHM-VAH geringe/hohe org. Belastung mit Mechanik				conc.	
TBC** άμεση δράση			conc.		

\*\* TBC (Φυματίωση)-άμεση δράση σύμφωνα με τη μέθοδο DGHM-VAH geringe/hohe org. Belastung  
To APESIN SPRAY έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 1040; EN 1275; EN1276; EN 1650; EN 13697

### Περιοχή Εφαρμογής:

Χρησιμοποιείται για την απολύμανση επιφανειών, εξοπλισμού και επίπλων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους (στρώματα, κρεβάτια, καρότσια μεταφοράς, δίσκοι εργαλείων, πατάκια μπάνιου και σχάρες, καλάθια απορριμμάτων, καθίσματα τουαλετών, χερούλια πορτών, έπιπλα, επιφάνειες εργασίας, κουπαστές, παπούτσια, κάλτσες, κλπ., καθώς και δυσπρόσιτα σημεία σε νοσοκομεία, ιατρεία, γηροκομεία, κοινόχρηστους χώρους και χώρους υγιεινής), καθώς και σε χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες ευαίσθητες στην αλκοόλη (π.χ. plexiglass).

### Εφαρμογή:

Χρησιμοποιείται αδιάλυτο. Ψεκάστε απ' ευθείας πάνω στα αντικείμενα από απόσταση 20-30 εκ. προσέχοντας να υγραίνονται τελείως, ή ψεκάστε πάνω σ' ένα καθαρό και απορροφητικό πανί και σκουπίστε μ' αυτό την επιφάνεια. Χρόνος αναμονής 1 λεπτό. Για τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα απαιτείται ξέπλυμα με πόσιμο νερό πριν την επαναχρησιμοποίησή τους. Προσοχή: Μην ψεκάσετε περισσότερο από 50 ml/m<sup>2</sup>. Μην ψεκάσετε περισσότερο από 2 m<sup>3</sup> επιφάνειας.

### Προφυλάξεις κατά τη χρήση:

Πολύ εύφλεκτο. Ερεθίζει τα μάτια. Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Μακριά από παιδιά. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μην αναπνέετε αερολύματα. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία UVV § 7 (Environmental Preventive Regulations), όταν χειρίζεστε απολυμαντικά πρέπει να φοράτε γάντια. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πάντοτε να διαβάσετε τις πληροφορίες της ετικέτας και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος πριν τη χρήση του.

### Οικολογία:

Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά, καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των πρώτων υλών. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη συμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον μπορούν να ζητηθούν. Η συσκευασία δίνεται για ανακύκλωση μόνο όταν αδειάζει εντελώς. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση

**ECOLINE**  
KANEI TH DIAΦOPΑ



**tana**  
PROFESSIONAL